


Guia rápido de consulta

Nota: Para obter instruções detalhadas sobre como usar o analisador de bioquímica Catalyst One*, consulte o *manual do operador do analisador de bioquímica IDEXX Catalyst One**.

Componentes do analisador Catalyst One*



†A foto da gaveta de amostras (à direita) é apenas para referência. Nem todos os materiais consumíveis devem ser carregados para um processamento único (por exemplo, nunca carregue um separador de sangue total e copo de amostra ao mesmo tempo).

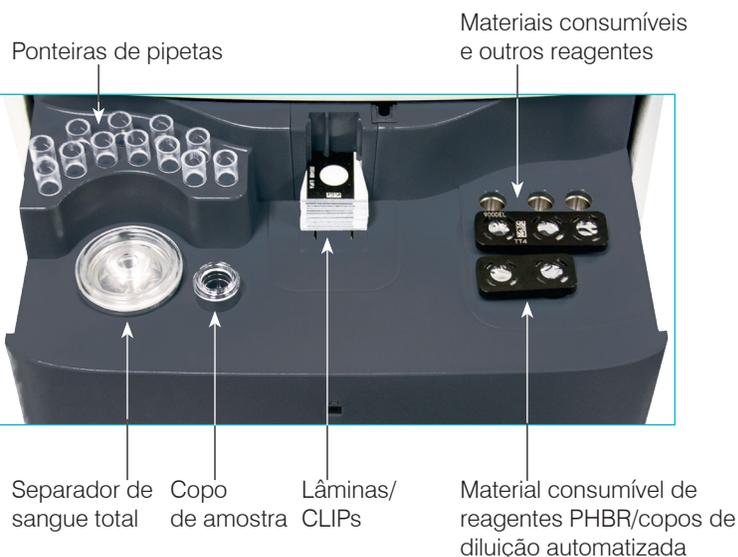

Volume de amostra necessário



†300 μ l é o volume de amostra recomendado ao processar um Chem 17 CLIP e eletrólitos.

Analizando uma amostra

1. Insira as informações da amostra na Estação IDEXX VetLab*.
2. Carregue os slides e a amostra na gaveta de amostras.
3. Feche a gaveta de amostras e pressione o botão iniciar no analisador.

Diluindo amostras

O analisador Catalyst One suporta diluições automatizadas (o analisador mistura a amostra e o diluente para você) e diluições manuais (você prepara a diluição fora do analisador). **Não dilua amostras que estejam sendo submetidas a testes de amônia, fenobarbital, frutossamina, T₄ total, SDMA, progesterona, ácidos biliares ou de eletrólitos.**

Realizando o controle de qualidade

1. Toque no ícone **Catalyst One** na tela inicial da Estação IDEXX VetLab.

2. Toque em **Manutenção** e em **Controle de Qualidade**.
3. Toque no número de lote do controle de qualidade usado e em **Executar CQ**.
4. Siga as instruções na tela para preparar e realizar o controle de qualidade.

Limpando os componentes internos (mensalmente)

1. Toque no ícone **Catalyst One** na tela Home da Estação IDEXX VetLab.
2. Toque em **Manutenção**, toque em **Limpar**, e depois siga as instruções na tela.
 - a. Abra a porta lateral do analisador.
 - b. Levante a tampa do carrossel até a alavanca verde se magnetizar na parte de cima.
 - c. Remova o carrossel.
 - d. Usando um pano com álcool aprovado pela IDEXX, limpe o anel da incubadora e a lente.
 - e. Limpe o círculo branco de referência no e todos os círculos pretos ao redor.
 - f. Usando um lenço óptico seco, seque a lente. E o círculo branco de referência.
 - g. Reencaixe o carrossel, abaixe a tampa até que ela prenda firmemente e feche a porta lateral.
 - h. Toque em **Pronto**.

