

# Analizador UA\* **IDEXX VetLab\***

## Guia de Referência Rápida

### Leitura de Fitas IDEXX UA\*

Use urina fresca não centrifugada. Homogenize vigorosamente a amostra de urina. A amostra deverá estar em temperatura ambiente quando o teste for realizado e não poderá ter sido colhida há mais de uma hora.

Para obter instruções adicionais, consulte o *Guia do Operador do Analizador UA\* IDEXX VetLab\**.




- 1 Use uma pipeta para encharcar a fita UA com a amostra de urina e certifique-se de que todos os pads de teste estejam umedecidos. Não dobre a fita.

**IMPORTANTE:** Use somente Fitas IDEXX UA com o Analizador UA IDEXX VetLab. Não use fitas de outras marcas.



- 2 Seque rapidamente (cerca de um segundo) a borda longa e, em seguida, a parte de trás da fita de teste em uma superfície absorvente (por exemplo, uma toalha de papel).

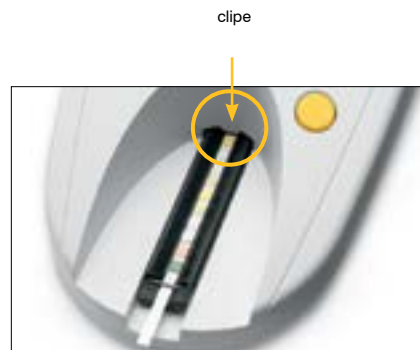

- 3 Coloque a fita de teste, com os pads de teste voltados para cima, na bandeja de fitas de modo que sua borda dianteira seja sustentada pelo clipe na abertura de inserção. A barra de retenção deve estar aberta. Cerca de 2 mm de fita devem ser mantidos sob o clipe.



- 4 Pressione o botão **Iniciar**. Um bipe soará. A bandeja avança ligeiramente e a barra de retenção é fechada.

A bandeja de fitas de teste puxa automaticamente a fita de teste para o analisador para que ela possa ser lida e, em seguida, volta para a posição inicial. Não remova a fita de teste até o analisador retornar para o modo "pronto para medir". As medições demorarão aproximadamente 80 segundos para ficar prontas após o botão Iniciar ser pressionado.



- 5 Após a impressão dos resultados, remova e descarte a fita de teste. Com um pano sem fiapos, remova qualquer resíduo de urina da bandeja.

**OBSERVAÇÃO:** Se o analisador UA estiver conectado à IDEXX VetLab Station, os resultados do teste serão transmitidos automaticamente.

### Suporte Técnico da IDEXX

América latina [soportelatam@idexx.com.br](mailto:soportelatam@idexx.com.br)

(Whatsapp +55 11 96907 8568)

Brasil 0800-777-7027

(Whatsapp +55 11 99180 4291)

EUA/Canadá 1-800-248-2483

Europa [idexx.eu](http://idexx.eu)