


## Teste de cortisol Catalyst

# Desbloquear comentários interpretativos específicos de resultados

Os comentários interpretativos fornecidos com o teste de cortisol Catalyst™ podem ajudar você a determinar melhor as próximas etapas para o seu paciente. Para aproveitar ao máximo essas informações importantes, considere estas perguntas e siga as etapas abaixo:

- + **Você está realizando vários testes de cortisol no mesmo paciente?** Em caso afirmativo, e se você já realizou um teste inicial de cortisol, siga as instruções **“Para testes adicionais...”** abaixo para garantir que cada resultado quantitativo seja agrupado sequencialmente e para acessar os **comentários interpretativos abrangentes**.
- + **Você inseriu as informações do protocolo?** Para receber comentários interpretativos específicos dos resultados, você deve selecionar o protocolo e a etapa do protocolo adequados para a execução do paciente; certifique-se de seguir o fluxo de trabalho específico do seu analisador abaixo:

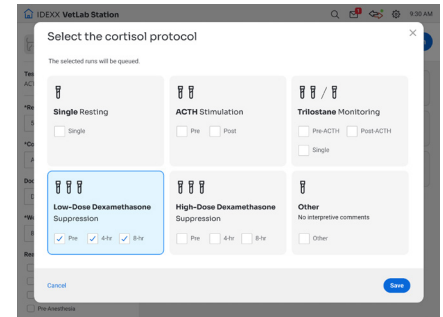

### Para testes iniciais de cortisol

#### Analísador bioquímico Catalyst One™



Inicie a execução na IDEXX VetLab™ Station. Na tela Selecionar equipamentos, toque em **Catalyst One** e, em seguida, toque em **Cortisol**. Selecione o protocolo desejado e suas etapas adicionais; toque em **Salvar** e, em seguida, toque em **Iniciar**.

### Para testes adicionais/testes de cortisol de várias etapas

Todas as etapas do protocolo selecionadas quando o teste inicial foi processado aparecem na lista Em processo, na tela inicial da IDEXX VetLab Station. Quando for processar a próxima amostra, toque no próximo teste disponível na lista, toque em **Em fila** e, em seguida, toque em **Iniciar execução**.

#### Analísador bioquímico Catalyst Dx™



Inicie a execução como você normalmente faria na IDEXX VetLab Station. No final da execução, identifique o protocolo e a etapa do protocolo quando solicitado e, em seguida, toque em **Enviar**.

**Nota:** Se optar por inserir o protocolo/as etapas do protocolo mais tarde, toque no paciente na lista Em processo, toque em **Adicionar detalhes** e, em seguida, selecione as informações do protocolo do paciente.

Para garantir que os resultados adicionais sejam agrupados com o resultado inicial e para receber comentários interpretativos:

1. Localize o resultado inicial de cortisol do paciente na IDEXX VetLab Station **OU** selecione o paciente aplicável na lista Pendente, na tela inicial.
2. Toque em **Adicionar exame** e, em seguida, em **Anexar resultados**.
3. Na tela de Selecionar equipamentos, selecione **Catalyst Dx**.
4. Ao ser solicitado no final da execução, selecione as informações do protocolo da execução e, em seguida, toque em **Enviar**.

**IMPORTANTE:** Se tiver um analisador Catalyst One e um analisador Catalyst Dx e pretende monitorar os resultados de cortisol de um paciente e/ou realizar testes adicionais/testes de cortisol de várias etapas, a IDEXX recomenda que todos os testes de cortisol sejam realizados no mesmo analisador, com o mesmo tipo de amostra.

## Para visualizar os resultados quantitativos e comentários interpretativos

Toque na mensagem no canto inferior esquerdo da IDEXX VetLab Station, indicando que os resultados do paciente estão prontos. Quando testes adicionais são adicionados como parte do teste de cortisol de várias etapas, os resultados são listados do teste adicional mais recente (acima) para o teste inicial (abaixo); os comentários interpretativos abrangentes aparecem com os resultados mais recentes.