

Limpendo o Analisador SNAP Pro*

Para limpar os componentes internos (executar semanalmente ou conforme necessário)



1. Desligue o analisador e desconecte o cabo de energia e/ou Ethernet.




2. Na parte inferior do analisador desligado, use uma chave de fenda de ponta achatada ou uma moeda para girar os dois fixadores de prata um quarto de volta no sentido anti-horário.



3. Remova a base do analisador.



4. Limpe **toda a** base usando um pano sem fiapos ou cotonete embebido em álcool isopropílico a 70%, sabão líquido neutro e água, ou uma solução de alvejante a 10%.

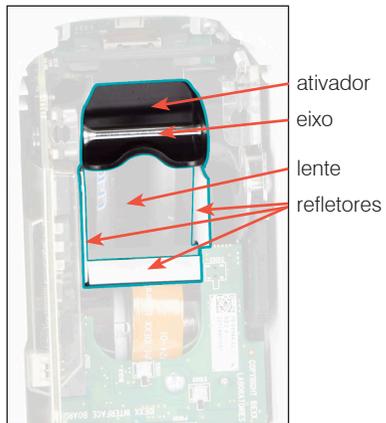

5. Limpe os 3 refletores brancos, o eixo e o ativador usando um novo pano sem fiapos ou cotonete embebido em álcool isopropílico a 70%, sabão líquido neutro e água, ou uma solução de alvejante a 10%. **NÃO limpe a lente.**



6. Depois que a base secar, reconecte-a ao analisador e certifique-se de que ela está travada no lugar.




7. Aperte os fixadores de prata no sentido horário um quarto de volta para travar a base no lugar.



8. Certifique-se de que a base e os fixadores de prata estejam alinhados com o analisador e travados no lugar. **Não travar a base e os fixadores corretamente pode afetar o desempenho do analisador.**

Para limpar o exterior do analisador e a tela (executar conforme necessário)

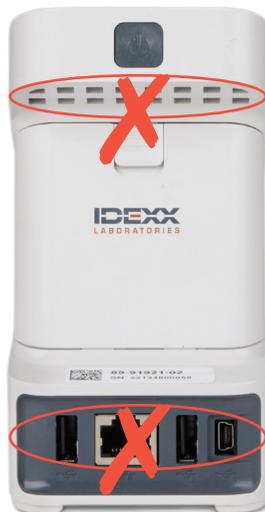

Limpe o exterior do analisador e a tela usando um pano sem fiapos umedecido com álcool isopropílico a 70%, sabão líquido neutro e água ou uma solução de alvejante a 10%.

NÃO limpe as aberturas abaixo do botão de energia ou as portas USB/alimentação/Ethernet.

Durante a limpeza, não exponha o analisador a:

- X** Solventes orgânicos
- X** Limpadores à base de amônia
- X** Marcadores de tinta
- X** Sprays contendo líquidos voláteis
- X** Inseticidas
- X** Desinfetantes
- X** Polidores
- X** Umidificadores de ambiente