

## Analizador SNAP Pro

O Analizador SNAP Pro\* é uma ferramenta de automação de testes rápidos em animais de estimação que envia resultados para o prontuário médico eletrônico do paciente, economizando tempo e dinheiro. Quando o SNAP Pro foi lançado, você ganhou os benefícios da automação, mas ainda precisava inserir manualmente os resultados do teste SNAP\*. Com o novo recurso ProRead\* no Analizador SNAP Pro\*, os resultados do teste SNAP são lidos automaticamente, economizando outra etapa no fluxo de trabalho do SNAP e tornando seu SNAP Pro ainda mais valioso.


### Visualização dos resultados do ProRead

Execute seu teste SNAP usando fluxo de trabalho de sua preferência. Depois que a análise estiver concluída, você notará que a tela Resultados é semelhante à que era sem o recurso ProRead. A diferença é que agora os resultados são fornecidos para você. Não é mais necessário ler a janela de resultados e inserir cada resultado positivo ou negativo.

Além dos resultados automatizados, a cor da luz de status no analisador varia dependendo dos resultados. Se a luz de status for:

- **Verde:** todos os resultados são negativos.
- **Azul:** pelo menos um resultado é positivo.
- **Amarelo:** o resultado pode precisar ser verificado devido a pontos muito claros ou desenvolvimento inesperado de cores (como detritos ou tonalidade azul) na janela de resultados. Se você concordar com os resultados exibidos, toque no ícone **Check Mark** (Marca de seleção) para salvar o resultado. Caso contrário, toque no ícone do resultado apropriado e, em seguida, toque no ícone **Check Mark** (Marca de seleção). Para cancelar o teste e voltar à Tela inicial, toque no ícone de fechar.

A cor da luz de status indica o status do resultado.

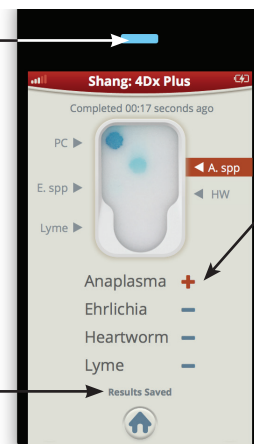

Os resultados positivos são marcados em vermelho.

Os resultados são salvos automaticamente.


**Verde** = todos os resultados são **negativos**.



**Azul** = pelo menos um resultado é **positivo**.



**Amarelo** = Requer interação do usuário para concluir a execução.

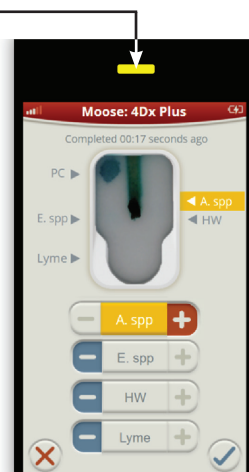

Precisa de ajuda? Acesse [idexx.com/prohelp](https://www.idexx.com/prohelp) para vídeos úteis de instalação e documentação de suporte.