

Guia de Referência Rápida do Analisador IDEXX VetLab* UA*


Como analisar uma amostra

1. Inicie a análise da amostra na IDEXX VetLab* Station (para mais informações, consulte o *Guia do operador da IDEXX VetLab Station*).
2. Depois de confirmar as informações do paciente na tela "Selecionar equipamentos", selecione o ícone **Analisador UA** e o ícone UA manual se desejado, e depois, toque em **Analisar**.
3. Confirme se a luz de LED de status do analisador UA está piscando em verde, indicando que as informações do paciente foram recebidas.
4. Aplique a amostra na Tira IDEXX UA (não use nenhuma outra marca de tiras) usando as seguintes etapas:
 - a. Use urina fresca não centrifugada. Homogenize vigorosamente a amostra de urina. A amostra deverá estar em temperatura ambiente quando o teste for realizado e deve ser analisada dentro de 1 hora após ser mantida em temperatura ambiente.
 - b. Use uma pipeta para encharcar a tira com a amostra de urina e certifique-se de que todas as almofadas de teste estejam umedecidas. Não dobre a tira.




Observação: Não é recomendado mergulhar a tira em um recipiente de urina, pois a tira pode ficar dobrada, causando um erro durante a execução da amostra.

- c. Toque rapidamente (1 a 2 segundos) a borda longa e, em seguida, a parte de trás da tira-teste em uma superfície absorvente (por exemplo, uma toalha de papel).

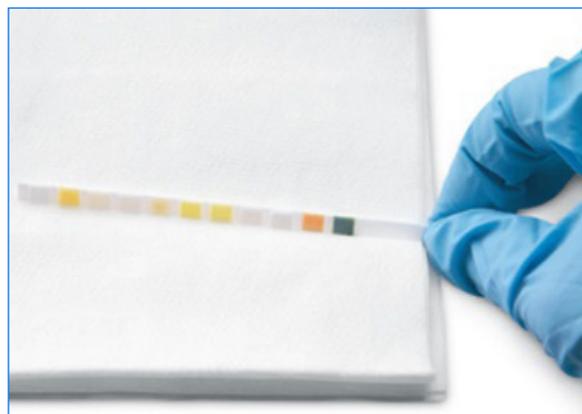

5. Coloque imediatamente a tira-teste, com as almofadas de teste viradas para cima, na bandeja de tiras-teste de modo que a borda dianteira fique firmemente presa pelo grampo no encaixe de inserção. A barra de retenção deve estar aberta.

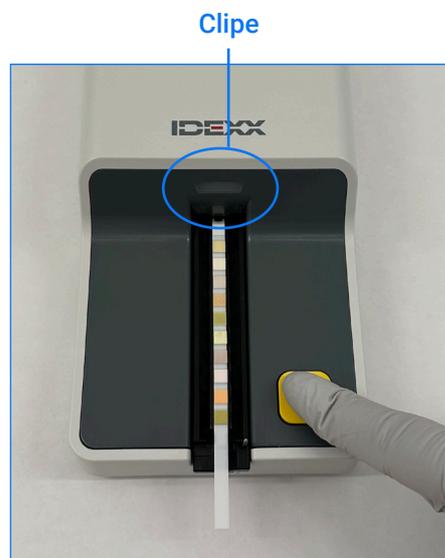

6. Pressione o botão **Iniciar**. A bandeja avança ligeiramente e a barra de retenção é fechada.
7. Após a conclusão da execução, remova e descarte a tira-teste. Limpe qualquer resíduo de urina da bandeja com um pano sem fiapos.

Como limpar a bandeja de tiras-teste

Limpe a bandeja de tiras-teste diariamente para evitar o acúmulo de urina, que pode causar erros.

1. Selecione **Desligar Analisador UA** na tela Equipamentos na IDEXX VetLab Station.
2. Retire a bandeja de tiras-teste do analisador.
3. Lave sob água corrente as partes contaminadas da bandeja de tiras-teste e, em seguida, limpe-as (se necessário) com álcool isopropílico a 70%. Os pequenos depósitos cristalinos, principalmente os que contaminam o mecanismo da barra de retenção ou as engrenagens no lado inferior da bandeja de tiras-teste, podem ser removidos com um pano macio. Seque a bandeja com pano que não solte fiapos.



Importante: Tenha cuidado para não danificar a almofada de referência cinza durante a limpeza e certifique-se de que ela esteja completamente limpa, encaixada corretamente e seca antes de ler uma tira-teste.

4. Com a barra de retenção mais próxima de você, deslize a bandeja no encaixe abaixo do LED de status para que a borda da bandeja fique alinhada com a borda do analisador.
5. Ligue o analisador UA pressionando o botão liga/desliga no lado direito. A autoverificação começa automaticamente e verifica se a almofada de referência está em boas condições. Caso contrário, uma notificação aparecerá na IDEXX VetLab* Station.

Como calibrar o analisador

O Analisador IDEXX VetLab* UA* deve ser recalibrado a cada 7 dias.

1. Certifique-se de que a bandeja de tiras-teste esteja limpa e seca.
2. Na tela inicial da IDEXX VetLab Station, toque no ícone do **Analisador UA** (ou toque em **Equipamentos** e, em seguida, toque em **Analisador UA**).
3. Toque em **Calibração**, e depois em **Executar calibração**.
4. Quando o LED de status do analisador estiver piscando em verde, coloque uma nova tira de calibração IDEXX VetLab* UA* na bandeja com as almofadas de teste viradas para cima, de modo que a borda dianteira fique firmemente presa por um grampo na extremidade dianteira do encaixe de inserção. A barra de retenção deve estar aberta.
5. Pressione o botão **Iniciar**.

Importante:

- + Tenha o cuidado de não tocar nas almofadas de teste da tira de calibração e não permita que entrem em contato com a urina ou outros líquidos.
- + Apenas Tiras de Calibração IDEXX VetLab UA podem ser usadas com o Analisador IDEXX VetLab UA.

A bandeja avança ligeiramente, a barra de retenção é fechada e o analisador lê a almofada de referência cinza e as almofadas de calibração. Em seguida, a bandeja retorna à posição inicial e a alavanca de tiras se abre.

O resultado da calibração será exibido na IDEXX VetLab Station, indicando Aprovado ou Reprovado. Se houver falha no processo de calibração, consulte o *Guia do Operador do Analisador IDEXX VetLab UA* para obter informações de resolução de problemas ou ligue para o Suporte Técnico IDEXX.

6. Remova e descarte a tira de calibração. Cada tira de calibração deve ser usada apenas uma vez.

Suporte Técnico IDEXX

América latina soportelatam@idexx.com.br (Whatsapp +55 11 96907 8568)
Brasil 0800-777-7027 (Whatsapp +55 11 99180 4291) • EUA/Canadá 1-800-248-2483
Europa idexx.eu